

CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE

Sensibilità e Specificità
Subito CheckUp Test Vaiolo delle Scimmie è stato confrontato con il kit Monkeypox Virus PCR. I risultati sono stati tabulati come di seguito.

Subito CheckUp Test Vaiolo delle Scimmie	Metodo		PCR		Risultati Totalia
	Risultati		Positivo	Negativo	
	Positivo	IgM	1	2	11
		IgG+IgM	5		
		IgG	3		
	IgG+IgM Negativo		1	198	199
	Risultati -totali		10	200	210

Sensibilità Relativa: 90.0% (95%CI*: 55.5%-99.75%)
Specificità Relativa: 99.0% (95%CI*: 96.43%-99.88%)
Accuratezza: 98.57% (95%CI*: 95.88%-99.70%)

*Intervallo di confidenza

Precisione Intra-Test
La precisione intra-test è stata determinata usando 10 repliche di tre campioni: un negativo, un negativo, un positivo basso e un positivo alto. I valori negativo, positivo basso, e positivo alto sono stati identificati correttamente il >_99% delle volte.

Inter-Test
La precisione inter-test è stata determinata da 10 test indipendenti sugli stessi tre campioni: un negativo, un positivo basso e un positivo alto. Sono stati testati tre lotti diversi del Subito CheckUp Test Vaiolo delle Scimmie su un periodo di 3 giorni usando campioni negativi, positivi bassi e positivi alti. I campioni sono stati identificati correttamente il >_99% delle volte.

Cross-reattività
Subito CheckUp Test Vaiolo delle Scimmie è stato testato su campioni positivi a IgG anti-HAV, HBsAg, HBsAb, anti-HCV, anti-HIV, anti-RF, HAMA, TP anti-Sifilide, anti-H.pylori, IgG anti-Toxoplasma, IgM anti-Toxoplasma, IgG anti-Rosolia, IgM anti-Rosolia, IgG anti-CMV, IgM anti-CMV, anti-SARS-CoV-2. I risultati non hanno mostrato alcuna cross-reattività.

Sostanze interferenti
I composti che seguono sono stati testati con Subito CheckUp Test Vaiolo delle Scimmie e non è stata osservata alcuna interferenza.

Acetaminofene: 20mg/dl	Caffeina: 20mg/dl	EDTA: 20mg/dl
Acido Acetilsalicilico: 20mg/dl	Acido Gentisico: 20mg/dl	Etanolo: 10%
Acido Ascorbico:2g/dl	Fenilpropanolamina: 20mg/dl	Glucosio: 20mg/dl
Bilirubina: 100mg/dL	Acido Salicilico: 20mg/dl	Fenotiazina: 20mg/dL

BIBLIOGRAFIA

1. Moore M, Zahra F. Monkeypox. 2022 May 22. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. PMID: 34662033.

INDICE DEI SIMBOLI

	Consultare le istruzioni per l'uso		Test per kit		Rappresentante autorizzato EU
	Solo per uso diagnostico <i>in vitro</i>		Usare entro		Monouso
	Conservare a 2-30°C		Numero lotto		# Catalogo
	Non usare con confezione danneggiata		Fabbricante		Attenzione

 **Hangzhou AII**Test Biotech Co.,Ltd .
#550, Yinhai Hangzhou Economic & Aerial technology development
Hangzhou, 310018 PR China

 **VidaQuick Biotech S.L.**
No. 132, Rosello Street, Barcelona
Barcelona Province, 08036, Spain

Importato e distribuito da:
Screen Italia Srl
Via dell'Artigianato, 16
06089 - Torgiano - Perugia - Italia
www.subitocheckup.it

Numero: 120950677
Data di revisione: 31-08-2022